



PowerTel 601


Bedienungs-
anleitung



Übersichtskarte

In dieser Übersichtskarte finden Sie alle Bedienelemente des PowerTel 601

Handgelenk-Vibrationsalarm

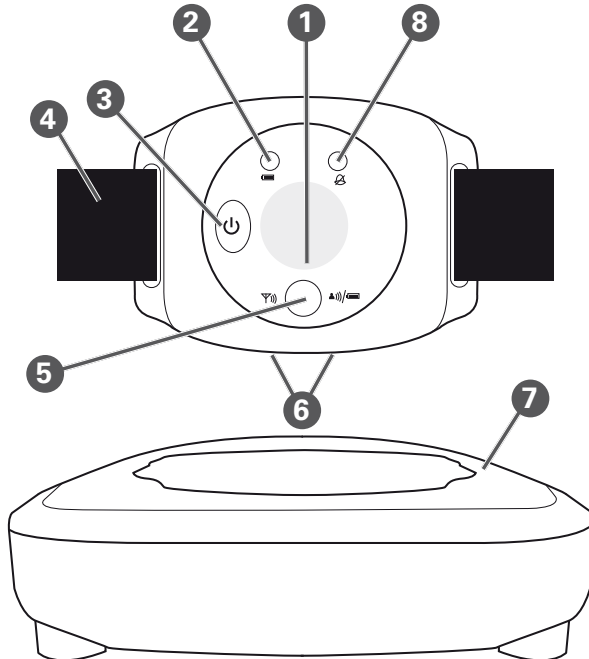

- 1 Notfalltaste
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Telefon PowerTel 680
- 2 Rote LED Batterieladevorgang
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Handgelenkband
- 5 Registrierungs-Modus/
Außerhalb der Reichweite/
Niedriger Batteriestand -
zweifarbige LED (grün oder rot)
- 6 Ladekontakte
- 7 Ladestation
- 8 Grüne LED für eingehende
Anrufe

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme	3	Niedriger Batteriestand	12
Verpackungsinhalt prüfen	4	Eingehende Anrufe	12
Einrichten des Handgelenk-Vibrations- alarms in vier einfachen Schritten	4	Falls Probleme auftauchen	13
1 Ladestation aufstellen	4	Fehlersuche	14
2 Ladeschale anschließen	5	Allgemeine Informationen	17
3 Handgelenk-Vibrationsalarm in die Ladestation legen	5	Sicherheitsinformationen	18
4 Handgelenk-Vibrationsalarm bei Ihrem PowerTel-Telefon registrieren	6	Aufstellungsort	18
Registrierungstasten	8	Stromversorgung	18
Umgang mit Handgelenk- Vibrationsalarm	10	Energiesparender Netzadapter- stecker	19
Einschalten	10	Stromausfall	19
Ausschalten	11	Medizinische Geräte	19
Handgelenkband	11	Entsorgung	20
Erreichbarkeit des Handgelenk- Vibrationsalarms	12	Wartung	20
		Garantie	21
		Konformitätserklärung	23

Inbetriebnahme

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme

Wichtig: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 18.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Handgelenk-Vibrationsalarm mit Handgelenkband
- 1 Ladestation mit Netzadapterstecker

Einrichten des Handgelenk-Vibrationsalarms in vier einfachen Schritten

1 Ladestation aufstellen

Platzieren Sie das Ladegerät folgendermaßen:

- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt


2 Ladeschale anschließen

Stecken Sie den bereits mit der Ladeschale verbundenen Netzadapterstecker in die Netzsteckdose.

Wichtig: Verwenden Sie unbedingt nur den mitgelieferten Netzadapterstecker, da ansonsten die ordnungsgemäße Funktion des PowerTel 601 nicht gewährleistet ist und das Produkt beschädigt werden könnte.

3 Handgelenk-Vibrationsalarm in die Ladestation legen

Legen Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm mit den beiden kleinen Anschlusskontakten nach unten in die Ladestation. Wenn der Vibrationsalarm ordnungsgemäß geladen wird, leuchtet eine rote LED über dem Batteriesymbol.

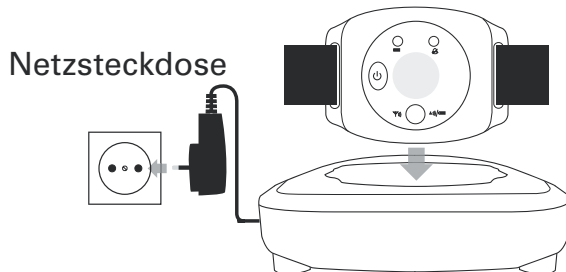



Im Handgelenk-Vibrationsalarm befindet sich eine aufladbare Batterie, die aufgeladen werden muss, damit der Vibrationsalarm funktionsfähig ist. Vor der erstmaligen Benutzung muss der Handgelenk-Vibrationsalarm mindestens 10 Stunden geladen werden. (Stromversorgung der Ladestation prüfen!)

Hinweis: Wenn die Batterie des Handgelenk-Vibrationsalarms vollständig aufgeladen ist, sollte sie mindestens fünf Tage halten. Bei niedrigem Batteriestand leuchtet die größere rote LED auf und blinkt langsam. Dann muss der Handgelenk-Vibrationsalarm wieder mindestens zehn Stunden geladen werden.

4 Handgelenk-Vibrationsalarm bei Ihrem PowerTel-Telefon registrieren

Wichtig: Wenn Sie Ihren Handgelenk-Vibrationsalarm nicht gleichzeitig mit Ihrem Telefon erworben haben, müssen Sie ihn erst bei Ihrem Telefon registrieren.


- i. Schalten Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm ein, indem Sie die Taste  etwa fünf Sekunden lang gedrückt halten.
- ii. Halten Sie die Taste  dann weitere 12 Sekunden gedrückt, bis die grüne Registrierungs-LED schnell blinkt. Dann bleibt der Handgelenk-Vibrationsalarm etwa 1 Minute im Registrierungs-Modus.

iii. Aktivieren Sie den Registrierungs-Modus auf Ihrem PowerTel-Telefon.

An einem PowerTel 500-, 502- oder PowerTel 580-Telefon gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Halten Sie die Registrierungstaste  etwa 10 Sekunden gedrückt, bis die Lade-LED blinkt.

An einem PowerTel 580 combo gehen Sie dazu folgendermaßen vor:


Halten Sie die Taste  gedrückt, bis im Display **anmelden** erscheint.

Hinweis: Wo genau sich die Registrierungstaste  auf Ihrem Telefon befindet, siehe Seite 8.


iv. Der Handgelenk-Vibrationsalarm ist ordnungsgemäß registriert und einsatzbereit, wenn die Registrierungs-LED grün leuchtet (nicht blinkt).

Hinweis: Die Registrierungs-LED blinkt abwechselnd grün und rot, wenn der Handgelenk-Vibrationsalarm entweder nicht registriert oder außerhalb der Reichweite ist. Gehen Sie näher an Ihr PowerTel-Telefon, damit Sie innerhalb der Reichweite sind.


Registrierungstasten

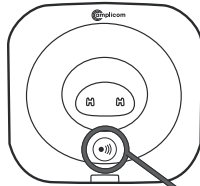

PowerTel
500/502

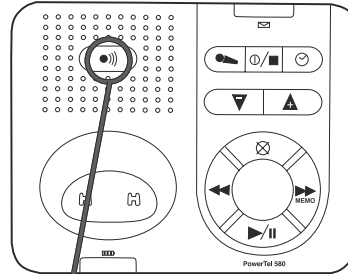

PowerTel 580

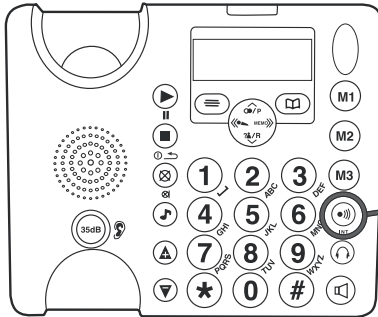

PowerTel 580 Combo

Halten Sie die
Registrierungstaste
☎ mindestens 10
Sekunden lang gedrückt


Umgang mit dem Handgelenk- Vibrationsalarm


Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Umgang mit Handgelenk-Vibrationsalarm

Einschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter  etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED mit dem Warndreieck leuchtet auf.

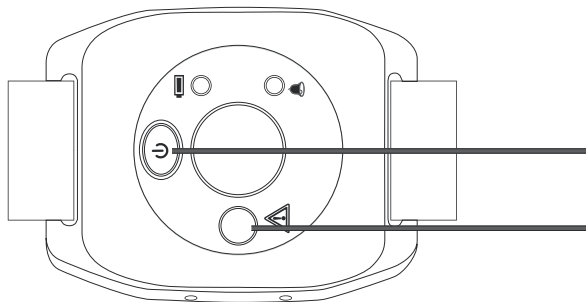

Ein-/Ausschalter

Registrierungs-Modus/außerhalb der Reichweite/niedriger Batteriestand

Hinweis: Wenn die LED abwechselnd grün und rot blinkt, ist Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm entweder nicht registriert oder außerhalb der Reichweite des Telefons. Gehen Sie näher an Ihr PowerTel-Telefon, damit Sie innerhalb der Reichweite sind. Wenn die LED weiterhin blinkt, müssen Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm wie auf Seite 6 beschrieben registrieren.

Ausschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter  etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED erlischt.

Handgelenkband

Das Handgelenkband ist bereits am Handgelenk-Vibrationsalarm angebracht. Wenn Sie es später erneut anbringen oder den Sitz korrigieren wollen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Schieben Sie das Handgelenkband durch den Schlitz an einer Seite des Handgelenk-Vibrationsalarms (von vorn nach hinten), führen Sie es um die Rückseite herum und schieben Sie es dann durch den anderen Schlitz (von hinten nach vorn), wie Sie es bei einer Armbanduhr machen würden.

Jetzt können Sie den Vibrationsalarm am Handgelenk tragen und bequem mit dem Klettverschluss befestigen.

Erreichbarkeit des Handgelenk-Vibrationsalarms

Wenn der Handgelenk-Vibrationsalarm sich außerhalb der Reichweite des Telefons befindet, ist er nicht funktionsfähig. Dann blinkt die große LED mit dem Warndreieck abwechselnd grün und rot. Gehen Sie in diesem Fall näher an Ihr PowerTel-Telefon, damit Ihr Handgelenk-Vibrationsalarm ordnungsgemäß reagieren kann.

Niedriger Batteriestand

Wenn die Batterie schwächer wird, wechselt die große LED von grün nach rot und blinkt. Legen Sie dann den Handgelenk-Vibrationsalarm für 10 Stunden in die Ladestation, bis die Batterie wieder aufgeladen ist.

Eingehende Anrufe

Wenn ein Anruf eingeht, vibriert der Handgelenk-Vibrationsalarm und im Display erscheint ein Glockensymbol.

Diesen Anruf können Sie dann wie üblich an Ihrem PowerTel-Telefon annehmen und beenden.

Falls Probleme auftauchen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Falls Probleme auftauchen

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fehlersuche

Mein Handgelenk-Vibrationsalarm vibriert nicht, wenn ein Anruf eingeht

Prüfen Sie, ob Sie den Vibrationsalarm registriert haben. Wenn Sie Ihren Handgelenk-Vibrationsalarm nicht gleichzeitig mit Ihrem Telefon erworben haben, müssen Sie ihn erst registrieren. Siehe dazu Schritt 4 der "Inbetriebnahme" auf Seite 6.

Wenn der Handgelenk-Vibrationsalarm registriert ist, aber trotzdem bei eingehenden Anrufen nicht vibriert, befinden Sie sich möglicherweise außerhalb der Reichweite. Gehen Sie näher an Ihr Telefon.

Mein Display blinkt rot

Die Batterie ist schwach. Legen Sie den Handgelenk-Vibrationsalarm zum Aufladen in die Ladestation. Die vollständige Aufladung dauert etwa zehn Stunden.

Allgemeine Informationen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Unter keinen Umständen sollten Sie das Gerät öffnen oder selbst Reparaturen durchführen.

Aufstellungsort

Platzieren Sie die Ladestation folgendermaßen:

- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt
- Gut geschützt vor Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung

Stromversorgung

Wichtig: Benutzen Sie unbedingt nur den mit dem PowerTel 601 gelieferten Netzadapterstecker, da ansonsten die ordnungsgemäße Funktion nicht gewährleistet ist und das Produkt beschädigt werden könnte.

Energiesparender Netzadapterstecker

Der zum Lieferumfang gehörige Netzadapterstecker erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG). Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitzustand deutlich geringer als bei den Adaptern älterer Modelle.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Stromausfall

Bei einem Stromausfall reagiert dieses Produkt nicht mehr. Deshalb müssen für Notrufe spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Medizinische Geräte


Verwenden Sie Ihren Handgelenk-Vibrationsalarm nicht:

- In der Nähe von Notfall- oder intensivmedizinischen Geräten
- Während eines Gewitters

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Entsorgung

Sie sind verpflichtet, bei der Entsorgung von Verbrauchsgütern die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Das Symbol  auf diesem Produkt bedeutet generell, dass elektrische und elektronische Geräte **getrennt** vom Hausmüll an einer geeigneten Sammelstelle des zuständigen Entsorgungsträgers abgegeben werden müssen. Batterien können beim batterievertreibenden Handel sowie bei den zuständigen Sammelstellen abgegeben werden.

Verpackungsmaterial muss entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts immer mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOM-Geräte werden nach neuesten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Die Verwendung sorgfältig ausgewählter Materialien und hochentwickelter Technologien gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn die Ursache für eine Störung im Gerät beim Fernsprechnetzbetreiber oder in einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten wiederaufladbaren Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Der Garantieanspruch erlischt nach Eingriffen des Käufers oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, falsche Platzierung oder Lagerung, unsachgemäße Anschlüsse oder Installation, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Reklamationen defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen bzw. ein Ersatzgerät bereitzustellen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dem Hersteller kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.

Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOM-Gerät erworben haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber dem Fachhändler geltend zu machen.

Zwei Jahre nach dem Kauf der Produkte können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5 EU Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der vorgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die komplette Konformitätserklärung können Sie kostenlos von unserer Website unter **www.amplicom.eu** herunterladen.



Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

FEB 10 – ISSUE 1.